

BODYBEAT便座 取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い下さい。
お読みになった後も、大切に保管して下さい。

保管用/保証書付

警告 (必ずお守りください)

誤った使い方をすると、死亡や重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- **次のような方は使用しない:** ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している方。
- **水場での使用に関する注意:** 本製品の「制御ボックス」および「電源BOX」は非防水です。絶対に水をかけたり、浴室など湿気の多い場所で使用しないでください。感電やショート、発火の原因になります。
- **分解・改造の禁止:** 絶対に分解や修理、改造をしないでください。発火や故障、事故の原因になります。
- **付属品の指定:** 付属の電源BOX以外は使用しないでください。


注意

誤った使い方をすると、損傷を負う可能性や物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- 皮膚に創傷や湿疹、はれものなど異常ある方は使用を控えてください。
- 用途以外の目的で使用しないでください。
- ケーブルを強く引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。
- お手入れの際は、必ず電源BOXをコンセントから抜いて行ってください。

各部の名称とセット内容

ご使用前に、セット内容に不足がないかご確認ください。

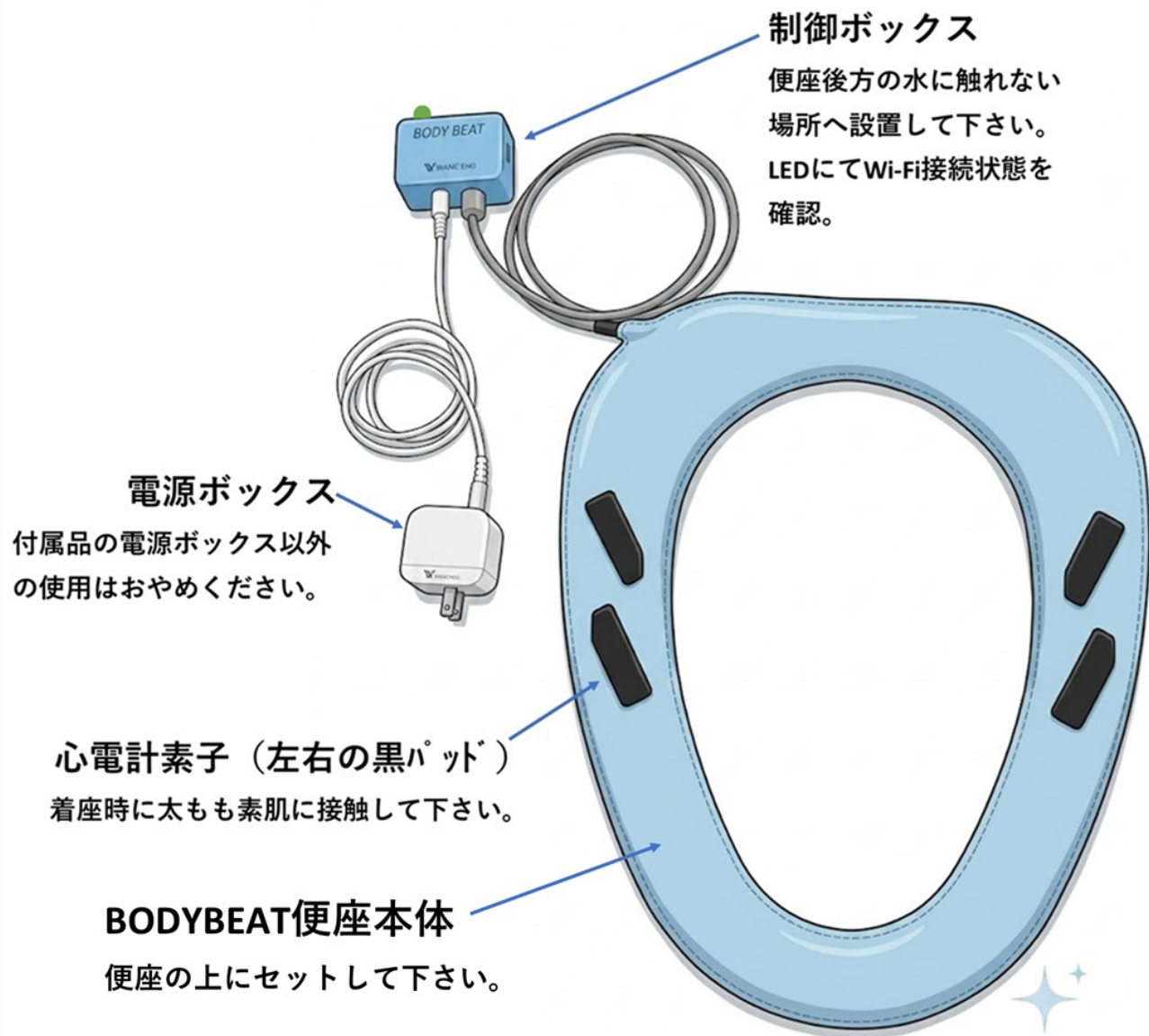

- **BODYBEAT便座本体:** 便座に乗せて使用するメインシートです。
- **制御ボックス:** 便座後方の水に触れない場所へ設置して下さい。
- **電源BOX:** 付属の電源BOX以外の使用はおやめ下さい。
- **心電計素子(左右黒パッド):** 着座時に太もも素肌に接触して下さい。

設置とご使用方法

設置参考図



1. 設置の手順

1. ご家庭の便座の上に「BODYBEAT便座」本体を乗せます。
2. 「制御ボックス」を便器側面やタンク側面など、水滴が直接かからない場所に固定します。
3. 「電源BOX」をトイレ室内のコンセントにしっかりと差し込みます。コードが足に引っかからないよう注意してください。

2. ご使用の手順

1. 制御ボックス内LEDが緑色点灯を確認してください。
2. 着座する際、本体左右にある黒いパッド「心電計素子」に、太ももの素肌が直接触れるように座ってください。

3. 素肌が接触することで、自動的に生体信号の計測が開始され、制御ボックスを通じてデータが処理されます。
4. 衣服や下着が素子に被さっていると正しく計測できませんのでご注意ください。

お手入れ方法・保管方法

- お手入れは必ず動作が停止している状態で行い、電源BOXをコンセントから抜いてください。
- 本体および付属品は絶対に水洗いしないでください。
- 本体の汚れが気になる場合は、ぬるま湯で希釈した中性洗剤に柔らかい布をひたし、よくしぼってから丁寧に拭き取ってください。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

製品仕様

販売名	BODYBEAT便座
定格電源	AC100V(付属専用電源BOX使用)
主な素材	本体表面:抗菌加工PVC 心電計素子:導電性ゴム 制御ボックス: ABS樹脂
使用環境	温度:5℃~35℃、相対湿度:85%RH以下(結露なきこと)